



Representaciones Médicas

Mayor seguridad
en la extracción
de sangre



Acti-Lance

Lancetas de Seguridad

ActiLance® Safety Lancet es muy fácil de manejar y su activación intuitiva del botón superior minimiza la capacitación requerida para los nuevos usuarios

Lancetas de seguridad para extracción de sangre capilar

Acti-Lance

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA LANCETA DE SEGURIDAD ACTI-LANCE® :

- **Activación intuitiva del botón superior**, diseño cóncavo para adaptarse a la forma del pulgar, botón que se detiene de forma permanente después del uso (indicador de activación a distinto entre el dispositivo usado y el no utilizado).
- **Fácil de manejar**: activación intuitiva, baja fuerza de disparo, no requiere carga de lanceta, solo operación de 2 pasos.
- **Cuerpo con forma de V** para un conveniente receso de los dedos y un agarre estable en la mano del usuario.
- **El cuerpo cerrado** asegura que la aguja se mantenga segura dentro del dispositivo antes y después de la punción, lo que protege por completo tanto al paciente como al usuario.
- **Protector de esterilidad confiable** cubre completamente la aguja hasta unos pocos segundos antes de la prueba. La forma ergonómica garantiza un fácil giro y arrastre mientras se prepara para la prueba.
- **Seguro**: no hay posibilidad de volver a usar.



Acti-Lance® Lite

Aguja de 28G
1.5 profundidad
de penetración



Acti-Lance® Universal

Aguja de 23G
1.8 profundidad
de penetración




Acti-Lance® Special

Cuchilla de 17G
2.0 profundidad
de penetración

ActiLance® Safety Lancet es muy fácil de manejar y su activación intuitiva del botón superior minimiza la capacitación requerida para los nuevos usuarios.

INSTRUCCIÓN DE USO DEL PRODUCTO

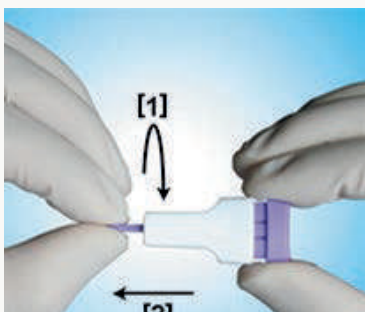

Gire la tapa protectora y tire de ella hacia afuera.



Coloque Acti-Lance® en el sitio de punción deseado y presione el botón superior para activar el dispositivo.



Aplique suavemente presión intermitente cerca del sitio de punción para obtener el volumen de sangre requerido.